

## MANUEL D'UTILISATION

# Bio-T kit<sup>®</sup> *Actinobacillus pleuropneumoniae*

Cat. N° BIOTK099 - 50 réactions

**Détection d'*Actinobacillus pleuropneumoniae* (APP)  
par PCR en temps réel (qPCR)  
avec contrôle positif interne (IPC) endogène**

## SUIDES

### Types de prélèvements

- Ecouvillonnage naso-pharyngé profond (ENP)
- Lavage broncho alvéolaire (LBA)
- Organes (amygdales)
- Analyses individuelles ou en mélange jusqu'à 3 selon la matrice

### Extractions des acides nucléiques (AN) recommandées par BioSellal

- Colonnes de silice (ex : BioSellal – BioExtract<sup>®</sup> Column Cat. N° BEC050 ou BEC250)
- Billes magnétiques (ex : BioSellal – BioExtract<sup>®</sup> SuperBall<sup>®</sup> Cat. N° BES384)

*Réservé à l'usage vétérinaire*



## GESTION DES DOCUMENTS

Le Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae* dispose de deux manuels techniques :

- Un manuel d'extraction du Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae* détaillant pour chaque type de prélèvement les méthodes d'extractions proposées par BioSella.
- Un manuel d'utilisation du Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae*, détaillant les différentes étapes de préparation de la qPCR.

Les dernières versions en vigueur de chacun des deux documents figurent dans le certificat d'analyse (CA) fourni avec le Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

En plus de ces 2 manuels, le dossier de validation ainsi que le manuel de vérification des performances du Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae* sont disponibles sur demande, contacter BioSella (contact@biosella.com).

## GESTION DES REVISIONS

BioSella indique les modifications apportées à ce document en les surlignant selon les règles présentées dans le tableau ci-dessous :

Gestion des révisions			
Type de modification Couleur de Surlignage	Modifications mineures	Modifications majeures 1	Modifications majeures 2
Impact sur la révision/version	Changement de la date de révision du document Pas de changement de version	Changement de la date de révision du document + changement de version	Changement de la date de révision du document + changement de version
Impact sur l'adoption de la méthode autorisée	Aucun (sauf en cas d'adoption de nouvelle matrice)	Aucun	Nouvelle adoption nécessaire
Exemples de modifications	Corrections : typographique, grammaticale ou de mise en forme	Changement de référence d'un EPC	Modification de la recette du Master Mix
	Ajout de nouvelles matrices pour l'extraction	Changement de référence d'un IPC exogène	Modification du protocole d'extraction validé
	Ajout d'informations donnant plus de détails ou alternative à un protocole		
	Ajout/Suppression d'informations optionnelles		

## PRESENTATION

### Recommandations pour le prélèvement, l'envoi et la conservation des échantillons

La technique de PCR en temps réel permet de révéler la présence de très faibles quantités de génome du pathogène. Celui-ci peut être plus ou moins rapidement dégradé selon la nature du pathogène (bactéries/parasites, virus enveloppés ou non...), la nature de son génome (ADN/ARN) et le type de prélèvement (présence de DNase/RNase). Ainsi, BioSellaal recommande de suivre les préconisations suivantes pour garantir un diagnostic optimal.

#### Prélèvements

Afin de prévenir les contaminations croisées entre échantillons pouvant conduire à un résultat faussement positif, il est important d'utiliser du matériel de prélèvement à usage unique et d'éviter un contact direct entre chaque prélèvement.

#### Envoi

Il est recommandé d'effectuer l'envoi au plus proche de la date de prélèvement, sous couvert du froid positif.

#### Conservation après réception

La conservation des échantillons est recommandée à  $5^{\circ}\text{C} \pm 3$  pendant 7 jours maximum puis  $\leq -16^{\circ}\text{C}$  au-delà.

## Gamme PIG

Ce kit appartient à la gamme PIG qui regroupe un ensemble de kits qui partagent des protocoles d'extraction et de PCR communs. Il est également compatible avec les autres kits BioSellaal de la gamme PIG et AVIAN (informations disponibles sur [www.biosellal.com](http://www.biosellal.com)).

## Description du Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae*


Le **Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae*** (Cat. N° BIOTK099) contient un **Master Mix prêt à l'emploi**, permettant de **détecter dans le même puits réactionnel**, la présence :

- **D'*Actinobacillus pleuropneumoniae* (APP)** grâce à un marquage 6-FAM,
- **D'un contrôle positif endogène IPC (beta actine)**, grâce à un marquage Cy5, qui permet de confirmer la présence de cellules de l'hôte en quantité suffisante, de valider l'intégrité des acides nucléiques dans l'échantillon et la qualité de l'extraction ainsi que l'absence d'inhibition de la réaction d'amplification.

Ce kit, basé sur une détection qualitative de APP (détecté ou non détecté) à partir de prélèvements de type écouvillonnage naso-pharyngé profond (ENP), lavage broncho alvéolaire (LBA) et organes a été développé et validé suivant les prescriptions de la norme **NF U47-600-2 éditée par l'AFNOR pour la partie PCR**.

Les méthodes d'extraction proposées sont décrites dans le manuel d'extraction du Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

## Description des étapes à suivre de l'échantillon jusqu'au résultat de qPCR

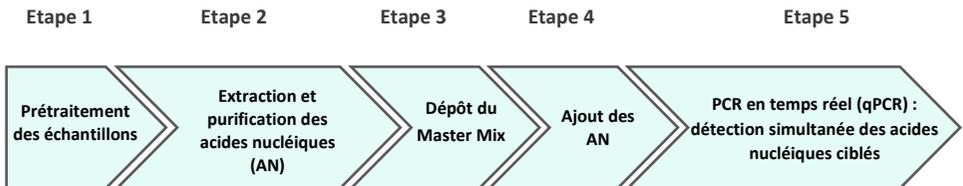

Manuel d'extraction du Bio-T kit® <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>		Manuel d'utilisation du Bio-T kit® <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>		
Ecouvillonnage naso-pharyngé profond (ENP)* Lavage broncho alvéolaire (LBA)* Organes*	BioExtract® Column BioExtract® SuperBall®	Master Mix prêt à l'emploi MMAPP-A	Echantillons NC/NCS Témoin positif de processus EPC (EPCAPP-A)	Détecteurs : FAM/Cy5 Référence passive : ROX Programmes : PIG/AVIAN ± RT en ramping Standard

\* prétraitement obligatoire

## Contenu du kit et conditions de conservation

Tableau 1. Descriptif du contenu du kit				
Description	Référence	Volume/tube	Présentation	Conservation
<b>Master Mix (MM)</b> Prêt à l'emploi	MMAPP-A	750 µl	tube bouchon <b>blanc</b> Sachet A	≤-16°C à l'abri de la lumière, Zone « MIX »
<b>External Positive Control (EPC)</b> Contrôle positif d'amplification d'APP	EPCAPP-A	110µl	tube bouchon <b>orange</b> Sachet B	≤-16°C Zone « Ajout d'acides nucléiques »
<b>Eau</b> RNase/DNase free	Aqua-A	1 ml	tube bouchon <b>bleu</b> Sachet B	5°C ± 3 ou ≤-16°C Zone « Ajout d'acides nucléiques »

## Liste des consommables et réactifs non fournis dans le kit

Tableau 2. Consommables et réactifs non fournis dans le kit			
Consommable / Réactif	Description	Fournisseur	Cat. N°
<b>Tampon ATL</b>	Tampon de Lyse	BioSella	ATL19076
<b>BioExtract® Column</b>	Kit d'extraction ADN/ARN format colonne (50)	BioSella	BEC050
<b>BioExtract® Column</b>	Kit d'extraction ADN/ARN format colonne (250)	BioSella	BEC250
<b>BioExtract® SuperBall®</b>	Kit d'extraction ADN/ARN format billes magnétiques (4 x 96)	BioSella	BES384

Pour les consommables liés au thermocycleur, se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil.

## Liste des réactifs de vérification des performances

Pour les adoptions de qPCR, l'ADN standard de APP (titré en nombre de copies /qPCR) fourni dans le kit qPCR (tube bouchon **orange**) peut être utilisé.

## Principales précautions à appliquer

- Porter les équipements de protection individuelle appropriés (à minima : blouse, gants jetables, voire lunettes de protection, masque FFP3 selon les risques zoonotiques...).
- Travailler dans des zones dédiées et séparées afin d'éviter toute contamination : « Extraction » (stockage des échantillons non extraits, zone avec matériel d'extraction), « MIX » (stockage des Master Mix prêts à l'emploi, préparation de plaques qPCR), « Ajout d'AN » (stockage et addition des acides nucléiques extraits et des contrôles dans la plaque qPCR), « PCR » (zone finale, contenant le(s) thermocycleur(s)).
- Utiliser des équipements dédiés pour chaque zone de travail (gants, blouse, pipettes, vortex ...).
- Décongeler tous les réactifs stockés à  $\leq -16^{\circ}\text{C}$  avant utilisation.
- Vortexer et centrifuger brièvement (centrifugeuse de paillasse) tous les réactifs juste avant utilisation.
- Utiliser des pointes à filtre.
- Il est recommandé de ne pas excéder 3 cycles de congélation-décongélation des réactifs, des échantillons, des lysats, et des acides nucléiques extraits. Suivant votre utilisation, nous vous préconisons de faire des fractions aliquotes de volume adéquat.
  
- Les génomes des pathogènes détectés par les kits de la **gamme PIG** sont à ADN ou à ARN. **Travailler avec de l'ARN étant plus exigeant que de travailler avec de l'ADN** (instabilité de l'ARN et omniprésence des RNases), **il est recommandé d'appliquer par défaut les précautions liées à l'utilisation de l'ARN:**
  - o Toujours porter des gants et les changer fréquemment notamment après tout contact avec la peau, les paillasses ou le matériel.
  - o Traiter toutes les surfaces et les équipements avec des agents d'inactivation des RNases (disponibles dans le commerce).
  - o Après avoir mis des gants et décontaminé le matériel, minimiser les contacts avec les surfaces et les équipements pour éviter la réintroduction des RNases.
  - o Utiliser des consommables « RNases free ».
  - o Il est recommandé de conserver les ARN réfrigérés pendant la manipulation puis de les congeler dès que possible de préférence à  $\leq -65^{\circ}\text{C}$  ou à défaut à  $\leq -16^{\circ}\text{C}$ .
  - o Ouvrir et refermer individuellement les tubes au fur et à mesure et limiter les durées d'ouverture afin d'éviter le contact avec les RNases présentes dans l'environnement (peau, poussières, surfaces de travail...).

# DETECTION D'APP PAR qPCR AVEC LE KIT BIOTK099

## Procédure globale à suivre

### 1) Etablir un plan de plaque définissant la position de chaque échantillon et incluant les contrôles décrits ci-dessous :

- **Contrôle négatif de processus (NCS)** : l'eau (ou PBS) remplace l'échantillon depuis le stade initial d'extraction voir de prétraitement.  
Ce contrôle est obligatoire pour chaque série d'extraction.
- **Contrôle négatif d'amplification (NC)** : 5 µl d'eau RNase/DNase free remplace les 5 µl d'extrait d'acides nucléiques au moment du dépôt sur la plaque qPCR. Le tube Aqua-A (bouchon **bleu**) fourni peut être utilisé.  
Ce contrôle est recommandé lors de la 1ère utilisation du kit ou pour vérifier l'absence de contamination du Master Mix suite à un résultat non conforme avec le NCS.
- **Contrôle positif d'amplification d'APP (EPC)** : il s'agit d'ADN synthétique (tube **EPCAPP-A**, bouchon **orange**), contenant les séquences cibles spécifiques de APP. Ce contrôle est obligatoire sauf en cas d'utilisation d'un témoin positif de processus.

**⚠ ATTENTION** : *La manipulation du tube EPC représente un risque de contamination, il est recommandé de ne l'ouvrir et de ne le manipuler que dans une zone délimitée, éloignée des autres composants et de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute contamination croisée avec des échantillons lors du dépôt sur la plaque.*

- Si disponible, **Témoin positif de processus « sentinelle », MRI**, un échantillon POSITIF d'écouvillon naso-pharyngé profond (ENP), de lavage broncho alvéolaire (LBA) ou d'organes faiblement chargé est extrait en même temps que les échantillons en un ou plusieurs exemplaires (selon le nombre d'échantillons analysés). Après qPCR, la valeur de Ct de ce témoin d'extraction sera reportée et suivie dans le temps sur une carte de contrôle. Le fait d'obtenir, après extraction et qPCR, une valeur de Ct attendue avec ce témoin positif valide l'ensemble de la méthode. Dans ce cas, l'utilisation de l'EPC livré avec ce kit n'est plus obligatoire.

## 2) Préparation de la plaque

### Dans la zone réservée au « MIX »

1. Après décongélation, vortex et brève centrifugation, **transférer 15 µl de Master Mix MMAPP-A** (tube bouchon **blanc**) dans chaque puits d'intérêt (échantillons et contrôles).

### Dans la zone dédiée à l'ajout des acides nucléiques

2. **Ajouter 5 µl d'acides nucléiques extraits (ou NCS, eau, témoin de processus, MRI ou EPC: tube EPCAPP-A, bouchon orange)** par puits d'intérêt, en veillant à les déposer bien au fond du puits, au contact du Master Mix et en évitant de faire des bulles.
3. Filmer la plaque avec le film optique ou fermer les tubes avec les capuchons optiques adaptés.

### Dans la pièce dédiée à l'amplification PCR

4. **Paramétrer le thermocycleur** (voir Tableau 3, Tableau 4, Tableau 5)
5. Il est recommandé de **centrifuger la plaque avant de la positionner dans le thermocycleur**, ceci permettra d'éviter la présence de gouttes sur les parois et d'éliminer au maximum les bulles et de placer les acides nucléiques au contact du Master Mix.
6. Démarrer le programme. Durée de run approximative de 70 min.

## 3) Paramètres de réglage du thermocycleur

Ce kit a été développé sur AriaMx™ (Agilent Technologies, ramping Fast par défaut) et confirmé sur ABI PRISM® 7500 Fast (Applied Biosystems) en ramping standard. Il est compatible avec tous les thermocycleurs possédant à minima les canaux de lectures 6-FAM et Cy5. Pour plus d'information, contacter notre support technique.

Tableau 3. Configuration du thermocycleur		
	ABI PRISM® 7500 Fast	AriaMx™
<b>Mode</b>	Quantitation – Standard curve	Quantitative PCR, Fluorescence Probe
<b>Ramping</b>	Ramping Standard	Ramping Fast par défaut
<b>Référence passive</b>	<b>ROX</b>	<b>ROX</b>

Tableau 4. Paramètres de réglage du thermocycleur			
Cible	Détecteurs		Volume final / puits
	Reporter	Quencher	
APP	FAM	NFQ-MGB ou None*	20 µl  = 15 µl Master Mix + 5 µl d'acides nucléiques ou contrôles†
IPC endogène	Cy5	NFQ-MGB ou None*	
à attribuer aux échantillons et contrôles†			

\* Choix variable suivant le modèle de thermocycleur, si besoin contacter le Support Technique de BioSellaal (tech@biosellaal.com)

† Les contrôles sont les NC (eau), NCS (eau extraite), le témoin de processus, MRI et EPC (ADN cible de APP).

Tableau 5. Paramétrage du PROGRAMME PIG/AVIAN SANS RT†		
Ramping Standard		
Cycles	Temps	Température
1 cycle	5 min	95°C
40 cycles	10 sec	95°C
	45 sec	60°C
	+ acquisition des données	

† La réalisation d'une étape de transcription-reverse (RT) préalable à la PCR pour l'amplification des génomes à ARN n'a pas d'incidence sur l'efficacité du Bio-T kit® *Actinobacillus pleuropneumoniae* (données présentées dans le dossier de validation disponible sur demande).

NB : Le Programme d'amplification est compatible avec l'ensemble des kits de la gamme PIG et AVIAN.

## INTERPRETATION DES RESULTATS

Afin d'analyser et d'interpréter les signaux obtenus après qPCR, il est nécessaire de placer la ligne seuil ou « threshold ». Elle doit être positionnée soigneusement afin d'obtenir le résultat le plus reproductible possible entre les différentes manipulations selon les paramètres définis dans l'**Annexe C de la norme NF U47-600-1**. Pour cela, on utilise un ensemble cohérent de signaux positifs, *a minima* le témoin positif (EPC), et on place la ligne seuil au-dessus du bruit de fond, et dans la zone exponentielle d'amplification.

Le cycle seuil, nommé « Ct » ou « Cq » en fonction des thermocycleurs, correspond à l'intersection entre les courbes d'amplification et la ligne seuil. Il permet la mesure relative de la concentration de la cible dans la réaction de PCR lorsqu'un extrait calibré est analysé dans la même série.

La série de qPCR est validée si les contrôles (EPC, Témoin positif de processus, MRI, NCS ou NC) fournissent des résultats valides, puis le résultat de chaque échantillon peut être interprété.

## Principaux cas de figures

### Lecture des Contrôles

Tableau 6. Différents scénarios de résultats concernant les contrôles			
	Cibles		Interprétation
	APP (FAM)	IPC endogène (Cy5)	
<b>NCS</b> Contrôle Négatif de processus <b>OBLIGATOIRE</b>	Neg	Neg	<b>Validé</b>
	Au moins une des deux valences <b>Pos</b>		Contamination avec un échantillon négatif/positif lors de l'extraction ou de la préparation de la plaque.
<b>NC</b> Contrôle Négatif d'amplification <b>FACULTATIF</b>	Neg	Neg	<b>Validé</b>
	Au moins une des deux valences <b>Pos</b>		Contamination avec un échantillon négatif/positif lors de la préparation de la plaque ou contamination du Master Mix/eau.
<b>EPC</b> Contrôle Positif d'amplification d'APP <b>OBLIGATOIRE</b> <i>EN ABSENCE DU TEMOIN POSITIF DE PROCESSUS</i>	Pos*	Neg	<b>Validé</b>
	Neg	Neg	Problème lors de la qPCR: Erreur de Master Mix ? Oubli de l'EPC ?
	Pos*	Pos	Contamination lors de la préparation de la plaque par un échantillon.
<b>Témoin positif de processus</b> <b>MRI</b> <b>OBLIGATOIRE</b> <i>SI ACCREDITATION</i> <b>RECOMMANDE</b> <i>SI DISPONIBLE</i>	Pos <sup>†</sup>	Pos <sup>‡</sup>	<b>Validé</b>
	Neg	Neg	Problème lors de la qPCR: Erreur de Master Mix ? Oubli d'ajout des acides nucléiques ou dépôt non au contact du Master Mix lors de la préparation de la plaque ? Dérive du processus : extraction et/ou qPCR ? Dégradation de l'échantillon contrôle ?

\* La valeur de Ct obtenue doit être conforme à la valeur donnée sur le certificat d'analyse (CA).

† La valeur de Ct doit être comprise dans les limites de la carte de contrôle.

‡ La valeur de Ct obtenue dépend du thermocycleur, de la matrice analysée et des méthodes d'extractions utilisées. Des valeurs d'IPC, obtenues à partir des différentes matrices avec les méthodes proposées par BioSella sont disponibles sur demande. BioSella recommande au laboratoire de déterminer sa propre valeur maximum de l'IPC tolérée en fonction de sa méthode d'extraction et de son thermocycleur.

#### Rappels :

L'IPC endogène a pour cible un gène exprimé par les cellules de suides, il ne peut donc être détecté en qPCR à partir des NCS, NC et EPC. Cependant, un léger signal peut être observé pour l'IPC dans les témoins en raison d'une réaction croisée entre la Beta actine des suides et la Beta actine humaine. Ce signal ne doit pas être inférieur à Ct 35.

## Lecture des Echantillons extraits

Tableau 7. Différents types de résultats pouvant être obtenus pour les échantillons		
Cibles		
APP (FAM)	IPC endogène (Cy5)	Interprétation
Neg	Pos*	Négatif ou Non détecté
Pos		Positif ou Détecté
Pos	Neg ou Ct>35	<b>Positif ou Détecté</b> Absence de cellules en quantité suffisante Présence d'inhibiteurs† ? Compétition avec la cible ?
Neg	Neg ou Ct>35	<b>Ininterprétable = analyse à refaire</b> Oubli d'addition des acides nucléiques extraits ou dépôt non au contact du Master Mix lors de la préparation de la plaque ? Présence d'inhibiteurs† ? Dégradation des acides nucléiques dans l'échantillon ? Problème de prélèvement: quantité de cellules insuffisante Problème lors de l'extraction ?

\* La valeur de Ct obtenue dépend du thermocycleur, de la matrice analysée et des méthodes d'extractions utilisées. Des valeurs d'IPC, obtenues à partir des différentes matrices avec les méthodes proposées par BioSella, sont disponibles sur demande. BioSella recommande au laboratoire de déterminer sa propre valeur maximum de l'IPC tolérée en fonction de sa méthode d'extraction et de son thermocycleur.

† En cas de suspicion d'inhibition, 1) Répéter la qPCR en prédiluant les acides nucléiques extraits au 1/10 voire au 1/100 dans de l'eau DNase/RNase free ou 2) Reprendre l'analyse depuis l'extraction.



[www.biosellal.com](http://www.biosellal.com)

### Support Technique

[tech@biosellal.com](mailto:tech@biosellal.com)

+33 (0) 4 26 78 47 62

### Renseignements et commandes

[contact@biosellal.com](mailto:contact@biosellal.com)

+33 (0) 4 26 78 47 60

